

# HYABAK®

HIALURONATO SÓDICO 0,15%

**Solución humectante y lubricante para ojos y lentes de contacto.**  
**Envase ABAK® - Sin conservantes.**

## INGREDIENTES:

Hialuronato sódico 0,15 g. Cloruro sódico, actinoquinol, trometamol, ácido clorhídrico, agua para inyectables hasta 100 mL.

## CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR ESTE PRODUCTO:

HYABAK es una solución hipotónica para ser administrada a nivel ocular o en las lentes de contacto. Contiene ácido hialurónico (agente hidratante y lubricante) y actinoquinol (agente con propiedades anti-UV).

HYABAK se recomienda:

- Para humedecer y lubricar el ojo cuando hay sensación de ojo seco o fatiga ocular inducidos por factores externos tales como el viento, la contaminación, polvo, calor seco, aire acondicionado, corrientes de aire durante el viaje, trabajo prolongado con pantallas de ordenador.
- Para usuarios de lentes de contacto, les permite lubricar e hidratar la lente facilitando su colocación o retirada, y proporcionando confortabilidad en la utilización de las mismas durante el día.

HYABAK, gracias al sistema ABAK®, dispensa las gotas de la solución sin contener conservantes. Por ello puede ser utilizado con cualquier tipo de lentes de contacto. La ausencia del conservante también permite la protección de los tejidos oculares.

## MÉTODO Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

INSTILACIÓN OCULAR.

**STERILE/A** Es necesario mantener ciertas precauciones para el uso efectivo del producto:

- Lavarse bien las manos antes de la aplicación.
- Evitar el contacto de la punta del envase con el ojo y los párpados. Mirar hacia arriba e instilar una gota de HYABAK en el saco conjuntival tirando suavemente del párpado inferior. El tiempo necesario para liberar una gota es más prolongado que con un envase tradicional. Cierre el envase después de cada utilización. Cuando lo ponga en las lentes de contacto: instile una gota de HYABAK en la concavidad de la lente.

## FRECUENCIA Y HORARIO DE ADMINISTRACIÓN:

Instile gotas a intervalos regulares a lo largo del día según sus necesidades.



### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USO:**

- No utilizar si usted es alérgico a alguno de sus componentes.
- Evite el contacto de la punta del envase con el ojo.
- No es inyectable ni bebible.
- **El filtro UV no es un sustitutivo del empleo de gafas de sol.**
- En caso de hallar roto el precinto, no utilice el producto.

MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS INDESEABLES (EFFECTOS ADVERSOS):**

Posibilidad infrecuente de irritación ocular leve.

### **INTERACCIONES:**

Deberá dejarse un intervalo mínimo de 10 minutos entre la aplicación de dos productos oculares diferentes.

### **ALMACENAJE DEL PRODUCTO:**

NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE CADUCIDAD CLARAMENTE MENCIONADA EN EL CARTONAJE.

Debe ser almacenado a una temperatura inferior a los 25°C.

No conservar el frasco más de 3 meses después de su apertura.

**FECHA DE REVISIÓN DEL PROSPECTO:** 05/2013.

### **FABRICANTE:**

Laboratoires Théa - 12, rue Louis Blériot  
63017 CLERMONT-FERRAND - Cedex 2 - FRANCIA